



Anleitung zur Herstellung einer Mess-Schablone für die Werte „E“


1. Material: ein ausreichend großes Stück Verpackungskarton, Winkel, Markierstift und Ziehklunge (Cutter).

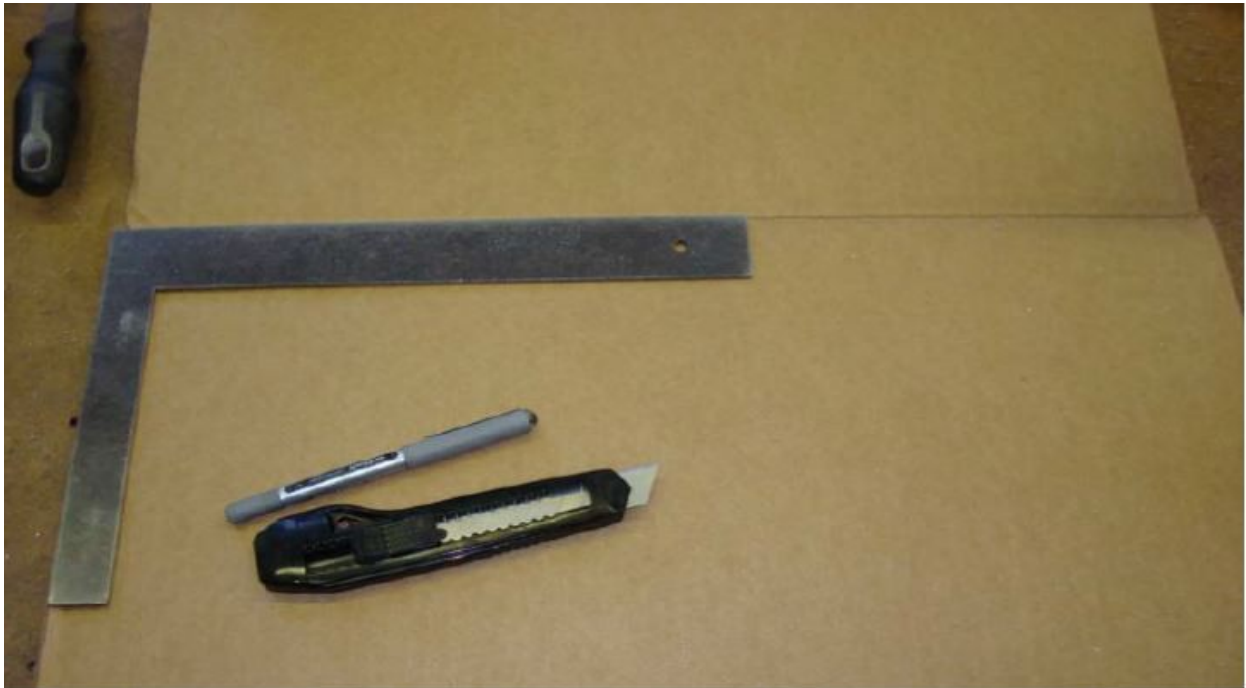

2. Legen Sie den Winkel am einer Ecke des Kartons an und zeichnen Sie seinen Umriß nach. Machen Sie eine zweite Umrißzeichnung.

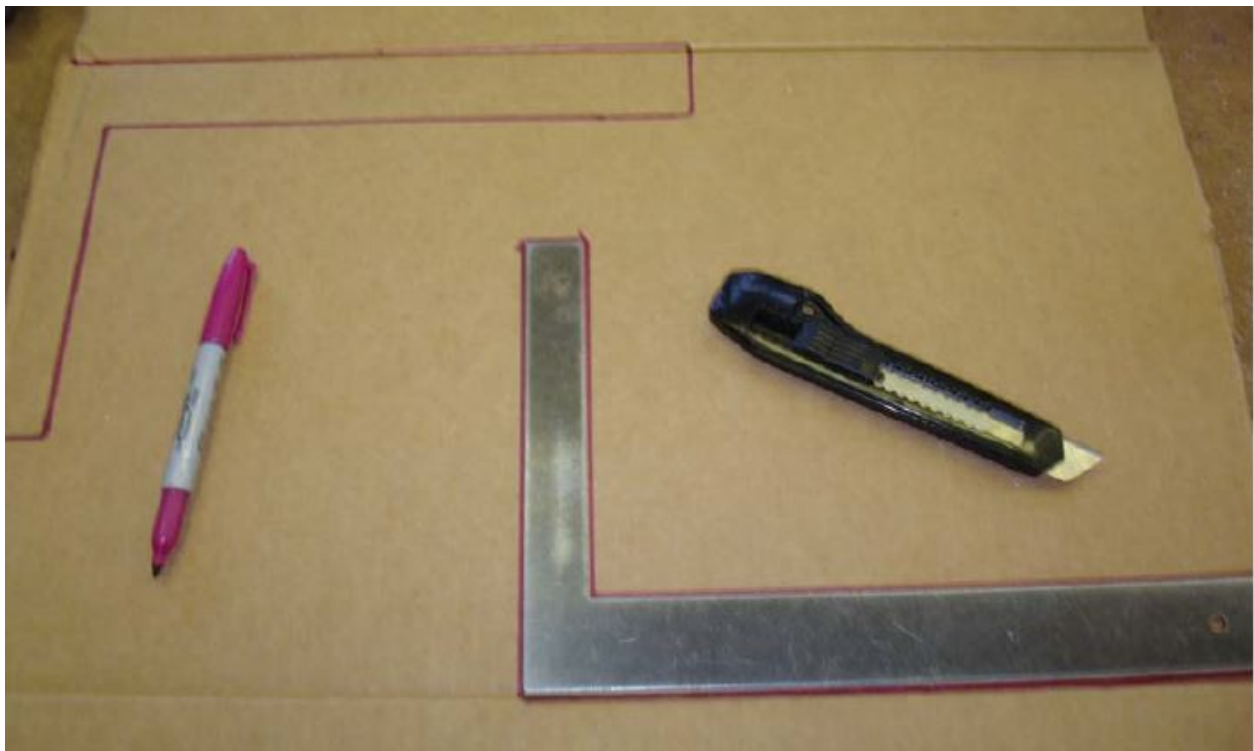

3. Schneiden Sie mit dem Cutter die beiden aufgezeichneten rechten Winkel aus .

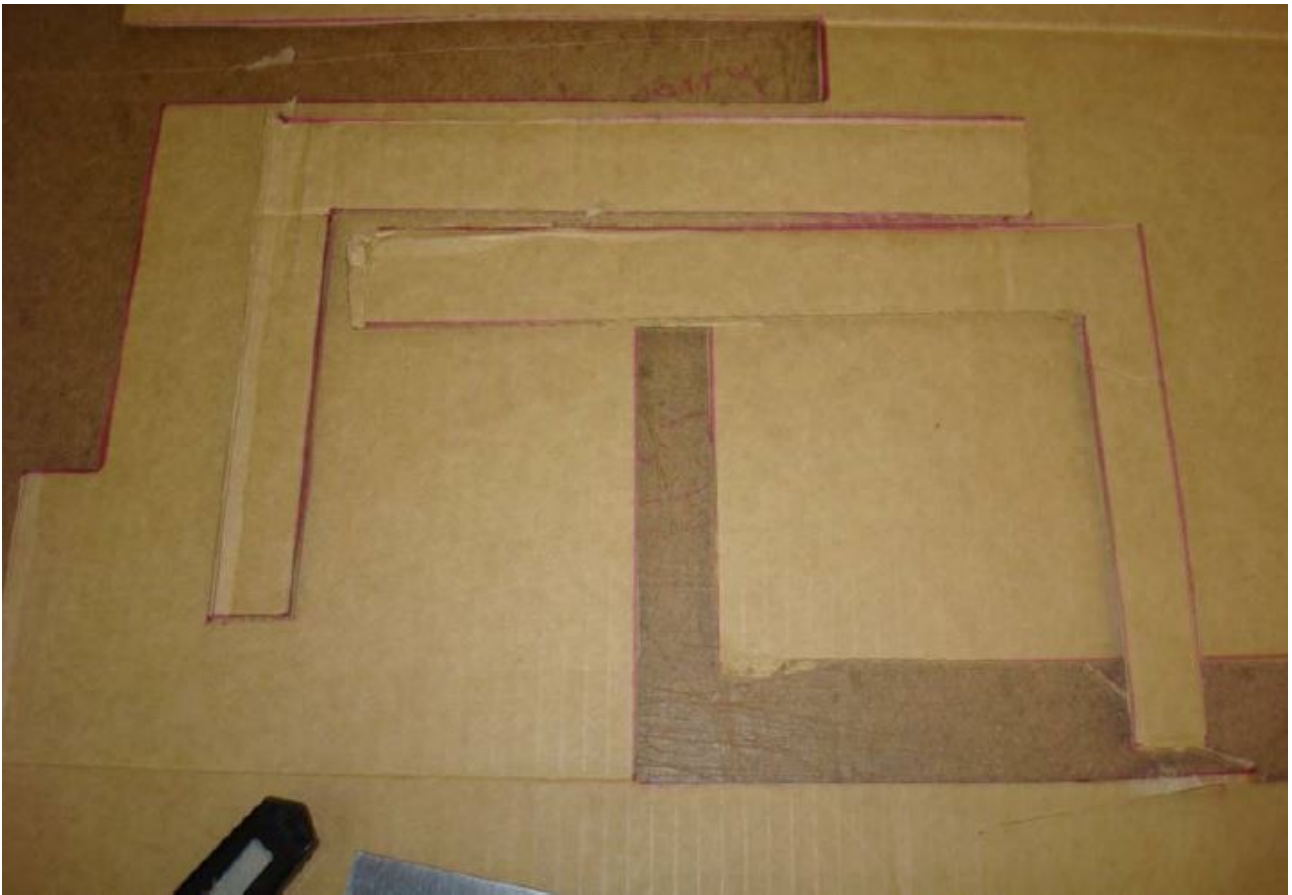

4. Sie haben jetzt die beiden Arme der Messlehre. Heften Sie sie mit einer Büroklammer aneinander.



5. Führen Sie die Messlehre über die Schultern des Hundes, so daß deren Enden den Hund gerade noch berühren.



6. Messen sie den Abstand zwischen den beiden Armen der Messlehre. Wiederholen Sie das bei den Rippen und am Rumpf.

